


NANO KAVİTASYON VE VELLA SHAPE TEKNOLOJİSİ TEK CİHAZDA!


NANO KAVİTASYON, VELLA SHAPE RADYOFREKANS, INFRARED, VAKUM ve ROLLER MASAJ

- ✓ Selülit Tedavisi
- ✓ Bölgesel İncelme
- ✓ Vücut Şekillendirme
- ✓ Yüz Lifting
- ✓ Yüz Şekillendirme

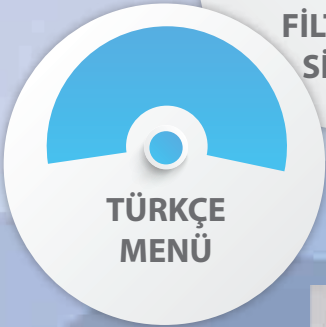


VAKUM+NANO KAVİTASYON

Vakum destekli NANO KAVİTASYON CROSS markası patentli teknolojisi standart kavitasyon teknolojilerinden 2 kat daha güçlü ve 10 kat daha zararsız bir teknolojidir. Kavitasyon; cerrahi olmayan, bölgesel zayıflama ve selülit tedavisinde kullanılan bir sistemdir. Kavitasyonda ultrason (Düşük frekans ses dalgaları) kullanılmaktadır. Cildin dış yüzeyine uygulanan bu ses dalgaları, yağ dokusundaki hücre sıvısında ani ve yüksek basınç değişikliklerine neden olur. Bununla birlikte oluşan kabarcıklar önce genişleme, sonra patlama yaratır. Kavitasyon denilen bu etki; Yağ hücrelerinin duvarlarını (zarını) tahrip ederek yağ hücrelerinin yapısını bozar. Bu dokudaki yağ hücreleri ve açığa çıkan yağ asitleri parçalanarak, lenf yolları sayesinde uzaklaştırılmaya çalışılır. NANO KAVİTASYON eski kavitasyon sistemlerinden farklı olarak Vakum teknolojisini ve çapraz atım teknolojisini beraber kullanır bu sayede uygulama yapılacak bölge vakumlanır, ses dalgaları sadece yağ olan bölgeye odaklanır böylece enerji sadece sorunlu bölgelerde kullanılır. Bu sayede enerji hiçbir şekilde iç organlara

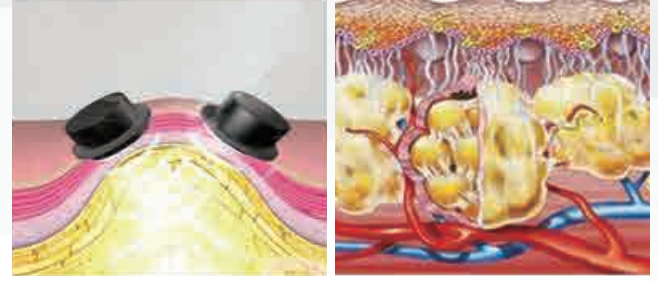

veya istenmeyen bölgelere gitmeyerek sorunlu bölgede kalır. Ayrıca Çapraz atım teknolojisinde çift başlıktan aynı bölgeye aynı anda uygulama yapıldığı için o bölgedeki tüm yağ hücrelerinde en yüksek sonuç görülür.

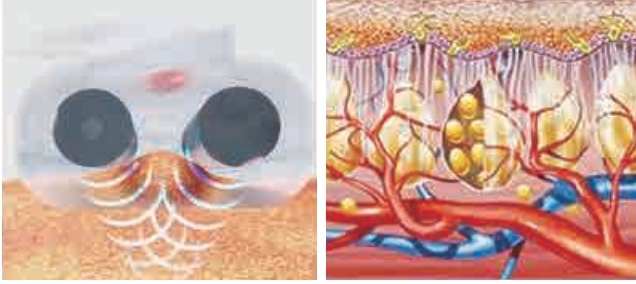

VELLA SHAPE RADYOFREKANS, INFRARED, VAKUM, ROLLER MASAJ

VELLA SHAPE

Radyofrekans, infrared, vakum ve roller masaj gibi dört sistemi bir arada barındıran Bölgesel incelleme ve selülit tedavisine yardımcı olan bir bölgesel incelleme cihazıdır.

RADYOFREKANS

Radyofrekans ısı kontrollü zayıflama yöntemidir. Radyo dalgaları vücuttaki su molekülleri ile iyonlarını (sodyum-potasyum-kalsiyum-magnezyum) harekete geçirir. Bunların hareketlenmesine bağlı olarak enerji açığa çıkar ve uygulama bölgesi ısınır. Uygulama yapılan bölgenin ısı 41-43 dereceye çıkar. (normalde vücut ısı 36-37 derecedir). Cilt ısı bu noktaya geldiğinde, cilt altı bölgedeki ısı 50-55 dereceye tekabül eder. Bu ısı vücuda herhangi bir tahribat ya da zarar vermez. Ancak bu yüksek ısı 2-22 mm derinlikler arasındaki yağ hücrelerine ulaşır ve bu hücrelerin zarlarının etkilenmesini sağlar. Bu şekilde yağ hücrelerinde erime meydana gelir. Bu teknoloji ile su düzeyi çok yüksek olan yağ hücrelerine ulaşılabilir. Yani yağ dokusunu eritebilmektedir. Eriyen yağlar dolaşımın artmasına bağlı olarak kan ve lenf yolu ile emilir ve vücuttan atılır.

Yaşlanmış ve yıpranmış Kollajen doku parçalanır ve ölür. Bunların yerine vücut yeni kollajen üretimine başlar. Vücutta sıklığı, gerginliği sağlayan dokuya bağ dokusu denir. Bu dokuyu oluşturan hücreler ise fibroblast hücreleridir. Oluşan ısı ile fibroblast aktivasyonu hızlanır. Yağların erimesi, kollajenlerin çoğalması ve bağ dokusunun yenilenmesi ile bölgesel incelleme, selülitlerin tedavisi, toparlanma, sarkıkların giderilmesi, kırışıklıkların yok olması sağlanır.

INFRARED

Kızıl ötesi ışın dokuyu 2-10 mm derinliğe kadar ısıtır. Radyofrekans ile beraber kullanıldığında ısıyı arttırmaya yardımcıdır ve Radyofrekans işlemini destekler.

VAKUM

Vakum terapi, ters basınç ile yağları ayırır ve basınç uygulayarak dirençlerini kırar. Bu şekilde de yağ dokularında azalma ve gevşeme olur vücuttan atılmaları hızlanır. Özellikle Selülit tedavilerinde çok etkindir. Vücut hatlarını şekillendirir, sıkılaşmayı sağlar, sarkmaları onarır ve kan dolaşımını hızlandırarak cilt güzelliğini sağlar, parçalanmış yağların dışa atılmasını destekler, kilo vermeye yardımcı olur.

ROLLER MEKANİK MASAJ

Mekanik masaj lenf drenajı sağlar (Dermal ve Hipodermal). Gerginleşmiş noktaları ve spazmları yatıştırarak, ödemlerin ve yorgunluk sonrası kaslarda biriken laktik asitin atılmasında yardımcı olur. Ritmik masaj ile kan dolaşımını hızlandırır, ciltte yaşlanma çizgilerini azaltır ve cilde esneklik sağlar. Özellikle bölgesel zayıflamada kullanılan ve hızla yaygınlaşan yöntemlerden biridir. Yapılan masaj sayesinde kan akışı hızlanır, damarlar açılır ve vücut toparlanır. Masaj tüm vücuda uygulanabilir ancak özellikle kalça, üst bacak, kol ve popo bölgelerinde, selülitte mücadele amaçlı daha etkili olarak kullanılır.



VÜCUT VAKUM NANO KAVİTASYON BAŞLIĞI

Patentli teknoloji ile üretilmiş rakipsiz başlık sayesinde Bölgesel inceleme ve Selülit tedavisinde muhteşem sonuçlar alabilirsiniz. Başlık üzerinde LCD ekran ve kontrol tuşları mevcuttur. Bu sayede uygulama ayarlarını ve başlatıp durdurmayı hem cihaz üzerindeki hem de başlık üzerindeki ekrandan yapabilirsiniz. Karın, Kalça ve Basen uygulamaları için uygundur.



VÜCUT RADYOFREKANS, INFRARED, VAKUM, ROLLER MASAJ BÜYÜK BAŞLIĞI

Radyofrekans, infrared, vakum ve roller masaj gibi dört sistemi bir arada barındıran Bölgesel inceleme ve selülit tedavisine yardımcı olan çok özel büyük başlıktır. Vücudumuzun Karın, Kalça, Basen ve sırt bölgeleri gibi geniş alanlar için uygundur. Başlık üzerinde LCD ekran ve kontrol tuşları mevcuttur. Bu sayede uygulama ayarlarını ve başlatıp durdurmayı hem cihaz üzerindeki hem de başlık üzerindeki ekrandan yapabilirsiniz. Cihazda bulunan özel filtre sistemi sayesinde ciltten emilen serbest radikaller, ölü hücreler ve yağ başlığa ve cihaza zarar vermeden bu filtrelerde toplanır. Özel kostüm giyilmesine ihtiyaç yoktur.



VÜCUT RADYOFREKANS, INFRARED, VAKUM, ROLLER MASAJ KÜÇÜK BAŞLIĞI

Radyofrekans, infrared, vakum ve roller masaj gibi dört sistemi bir arada barındıran Bölgesel inceleme ve selülit tedavisine yardımcı olan çok özel küçük başlıktır. Vücudumuzun kol, omuz, alt bacak bölgeleri gibi dar alanlar için uygundur. Başlık üzerinde LCD ekran ve kontrol tuşları mevcuttur. Bu sayede uygulama ayarlarını ve başlatıp durdurmayı hem cihaz üzerindeki hem de başlık üzerindeki ekrandan yapabilirsiniz. Cihazda bulunan özel filtre sistemi sayesinde ciltten emilen serbest radikaller, ölü hücreler ve yağ başlığa ve cihaza zarar vermeden bu filtrelerde toplanır. Özel kostüm giyilmesine ihtiyaç yoktur.



YÜZ RF + VAKUM BAŞLIĞI

Radyofrekans ve Vakum sistemini bir arada bulunduran değişebilen 3 ayrı ucu bulunan özel bir başlıktır. Yüz bölgesinde Lifting, kırışıklık tedavisi, göz kapağı sıkılaştırma ve göz çevresi kırışıklık tedavisi için kullanılır. Uygulama bölgesine göre başlık uçları mevcut olup kolayca değiştirilebilir.



VAKUM	10 Kpa - 90 Kpa (5.7 cmHG – 68,4 cmHG)
VAKUM ARALIĞI	0,5 S – 7,5 S
ROLLER HIZI	0-36 dev/dak
ROLLER ÇALIŞMA MOD	2 Değişik Mod
NANO KAVİTASYON GÜCÜ	2 x 60 W
NANO KAVİTASYON FREKANSI	2 X 40 Khz
RADYO FREKANS GÜCÜ	60 W a kadar
INFRARED LED GÜCÜ	30 W a kadar
LAZER DALGA BOYU	940 nm
VAKUM	Aralıklı

KLİNİK VERİLER



Öncesi

Sonrası



Öncesi

Sonrası



Öncesi

Sonrası



Öncesi

Sonrası



www.doguskozmetik.com.tr

www.crossbeauty.com